

So funktioniert somnipax pure

Der somnipax pure ist ein diskreter Nasenspreizer mit Atemluffilter der in die Nase eingefügt wird, um die Nasenatmung zu stärken, die Atemluft zu reinigen und Schnarchen zu vermindern. Die auswechselbaren Filter des somnipax pure filtern beim Einatmen die gängigsten Partikel aus der Atemluft, wie Hausstaub oder allergieauslösende Pollen. Der somnipax pure verhindert somit, dass man Schmutz, Pollen oder andere Partikel aus der Luft einatmet und dadurch die Schleimhäute gereizt werden und anschwellen. Der somnipax pure besteht aus angenehm weichem, medizinischem Kunststoff. Da der Nasenspreizer ausschließlich mechanisch wirkt, ist er auch bei regelmäßigem Gebrauch frei von Nebenwirkungen.



So wenden Sie somnipax pure am Besten an

1. Reinigen Sie zuerst Ihre Nasengänge, dazu können sie gut eine Nasendusche (wie z.B. NoseBuddy) verwenden.
2. Beim ersten Einsetzen sollten Sie sich vor einen Spiegel stellen. Das erleichtert das Einsetzen.
3. Entnehmen sie den somnipax pure sowie zwei Filter aus der Verpackung. Setzen Sie nun die Filter in den Nasenspreizer ein. Dafür schieben Sie die Filter einfach in die zylinderförmigen Aussparungen.
4. Zum Einsetzen in die Nase halten Sie den somnipax pure am hufeisenförmigen Teil fest, sodass die zylinderförmigen Komponenten nach oben zeigen.
5. Nun schieben Sie die beiden Röhren des somnipax pure mit leichtem Druck so weit in Ihre Nase ein, bis das hufeisenförmige Verbindungsstück am Nasensteg anliegt. Wenn Sie eine sehr kleine Nase haben oder Ihre Nasenlöcher sehr eng sind, kann es sein, dass Sie den somnipax pure nicht ganz so tief einschieben können.
6. Der Nasenspreizer sitzt dann richtig, wenn Sie ihn beim Tragen nicht bzw. kaum spüren.

Der somnipax pure sollte Ihnen beim Tragen keine Schmerzen bereiten. Während der ersten paar Nächte mit dem Nasenspreizer kann es allerdings vorkommen, dass Sie ein leichtes Fremdkörpergefühl in der Nase verspüren. Das wird sich nach kurzer Eingewöhnungszeit legen.

somnipax

Gebrauchsinformation für somnipax pure

Reinigungsanleitung

Der somnipax pure kann bis zu 60 Mal benutzt werden, die Filter sollten Sie jedoch spätestens nach dreimaligem Gebrauch austauschen. Wenn Sie den somnipax pure nach dem Gebrauch aus der Nase entfernen, entnehmen Sie bitte die umgehend die Filter. Weisen die Filter keine Verunreinigungen auf, lagern Sie sie trocken. Sie können dann bei der nächsten Anwendung wiederverwendet werden. Verunreinigte Filter bitte direkt entsorgen und ersetzen (Ersatzfilter liegen der Lieferung bei). Den somnipax pure nach Benutzung bitte umgehend mit lauwarmem Wasser abwaschen und mit einem sauberen Handtuch trocknen. Verzichten Sie bei der Reinigung auf scharfe oder laugenhaltige Reinigungsmittel, da diese das Material angreifen und auch mit den empfindlichen Nasenschleimhäuten nicht in Berührung kommen sollten. Den somnipax pure sollten Sie an einem trockenen, sauberen Ort aufbewahren

Wichtige Hinweise

Wenden Sie somnipax pure nicht an, wenn Sie Probleme beim Einsetzen aufgrund einer nicht symmetrischen Nase haben oder bei Ihnen eine verlegte oder behinderte Nasenatmung bekannt ist. Ziehen Sie dann bitte vorher Ihren HNO-Arzt zu Rate.



Hersteller

AescuBrands UG (haftungsbeschränkt) - Henkestr. 91
91052 Erlangen - Deutschland