



**Außergewöhnlicher
Tragekomfort
Hochwertige Materialien
Einfache Anwendung**

Inhalt

- * DragonPearl® L für die I. Trainingseinheit (ca. 4 Wochen)
- * DragonPearl® M für die weiterführende II. Trainingseinheit (2-4 Wochen)
- * Sicherheitsband Gummiring
- * Hygiene-Box

**Trainingssystem
zur
Schnarchbefreiung**

Wirkung

Für einen gesunden, geräuschfreien und erholsamen Schlaf benötigen Menschen eine korrekte natürliche Stellung ihres Kiefers, der Zunge sowie der Mundhöhle.

DragonPearl® L (die I. Trainingseinheit) ist speziell dafür konstruiert. Wir empfehlen damit 4 Wochen zu trainieren.

DragonPearl® M (die II. Trainingseinheit) festigt den über die vorangegangenen 4 Wochen erzielten Erfolg. Ziel des Programms ist, nach ca. 6 –8 Wochen auch ohne DragonPearl® ruhig schlafen zu können.

Anwendungsgebiete

Schnarchen, Apnoe, Zähneknirschen, Erschöpfung trotz langer Schlafdauer

Anwendung

Legen Sie DragonPearl® L mit der Perle (Seite mit 2 Löchern nach oben) unter die Zunge. Je nach Tragegefühl beißen Sie auf die erste Kerbe (direkt hinter der Kugel) oder auf die 2. Kerbe der Beißschiene. Atmen Sie nun gleichzeitig durch Nase und Mund. Das führt zu einer erstaunlichen Wirkung.

Reinigung

mit handelsüblichen Mundspülungen oder Prothesenreinigern, danach mit klarem Wasser gründlich abspülen, Keine ätzenden Mittel verwenden!

Aufbewahrung in der praktischen Hygienebox. DragonPearl® besteht aus wärmeempfindlichem Material und darf daher keiner übermäßigen Hitze (max. 80°C) ausgesetzt werden. DragonPearl® ist aus weichem, hochwertigem Kunststoff in Deutschland hergestellt. Dieser hochwertige Kunststoff verfügt über eine hervorragende Innen- und Außenglätte und ist dadurch einfach zu reinigen.

Dragon Pearl

**Außergewöhnlicher
Tragekomfort
Hochwertige Materialien
Einfache Anwendung**

Inhalt

- * DragonPearl® L für die I. Trainingseinheit (ca. 4 Wochen)
- * DragonPearl® M für die weiterführende II. Trainingseinheit (2-4 Wochen)
- * Sicherheitsband Gummiring
- * Hygiene-Box

Wirkung

Für einen gesunden, geräuschfreien und erholsamen Schlaf benötigen Menschen eine korrekte natürliche Stellung ihres Kiefers, der Zunge sowie der Mundhöhle.

DragonPearl® L (die I. Trainingseinheit) ist speziell dafür konstruiert. Wir empfehlen damit 4 Wochen zu trainieren.

DragonPearl® M (die II. Trainingseinheit) festigt den über die vorangegangenen 4 Wochen erzielten Erfolg. Ziel des Programms ist, nach ca. 6 –8 Wochen auch ohne DragonPearl® ruhig schlafen zu können.

Anwendungsgebiete

Schnarchen, Apnoe, Zähneknirschen, Erschöpfung trotz langer Schlafdauer

Anwendung

Legen Sie DragonPearl® L mit der Perle (Seite mit 2 Löchern nach oben) unter die Zunge. Je nach Tragegefühl beißen Sie auf die erste Kerbe (direkt hinter der Kugel) oder auf die 2. Kerbe der Beißschiene. Atmen Sie nun gleichzeitig durch Nase und Mund. Das führt zu einer erstaunlichen Wirkung.

Falls es für Sie zu Beginn ungewohnt ist, können Sie das Gerät auch 15- 20 Min. vor dem Schlafengehen anwenden, statt es die ganze Nacht zu tragen. Das führt zu mindest zu einer ersten, verbesserten, ruhigen Schlafqualität. Zur Sicherheit, gegen Verschlucken und Verrutschen kann das Sicherheitsband befestigt werden. Der mitgelieferte Gummiring dient zur Einstellung der erforderlichen Weite. Schieben Sie den Ring soweit nach außen bis Sie das Band über den Kopf ziehen können. Schließen Sie den Ring soweit, bis ein angenehmer Tragekomfort erreicht ist.

Reinigung

mit handelsüblichen Mundspülungen oder Prothesenreinigern, danach mit klarem Wasser gründlich abspülen, Keine ätzenden Mittel verwenden! Aufbewahrung in der praktischen Hygienebox. DragonPearl® besteht aus wärmeempfindlichem Material und darf daher keiner übermäßigen Hitze (max. 80°C) ausgesetzt werden. DragonPearl® ist aus weichem, hochwertigem Kunststoff in Deutschland hergestellt. Dieser hochwertige Kunststoff verfügt über eine hervorragende Innen- und Außenglätte und ist dadurch einfach zu reinigen.

**Trainingssystem
zur
Schnarchbefreiung**