

SomnoCushion® Standard

Medizinisches Hilfsmittel zur Anwendung bei habituellem Schnarchen in Rückenlage sowie lageabhängiger leichter und mittelgradiger obstruktiver Schlafapnoe.



Gebrauchsanweisung

(vor Gebrauch sorgfältig lesen)

Beschreibung: Der SomnoCushion® Rucksack wird während des Schlafs getragen. Er veranlasst dazu, auf der Seite zu schlafen und hindert daran, sich in der Nacht auf den Rücken zu drehen. Im Gegensatz zum Schlaf in Seitenlage kann die Rückenlage Schnarchen und nächtliche Atemaussetzer begünstigen. Die Rucksackhülle enthält für die Lagepositionierung ein mit dem Mund aufblasbares Luftkissen. Individuelle Einstellmöglichkeiten des Luftkissendrucks und der Riemenspannung im Bereich von Bauch und Schultern sorgen für einen hohen Tragekomfort. Führen Sie zunächst das luftleere Kissen entweder von oben oder unten in die Rucksackhülle ein. Blasen Sie dann das Luftkissen mit dem Mund auf, so dass die Rucksackhülle vollständig ausgefüllt wird. Drücken Sie das Ventil in das Luftkissen. Stellen Sie die Bänder so ein, dass SomnoCushion® zentriert auf Ihrem Rücken möglichst eng und ohne Spielraum anliegt.

Indikationen:

- Einfaches (habituelles) lageabhängiges Schnarchen
- Lageabhängige leichte und mittelgradige obstruktive Schlafapnoe (nach ärztlicher Konsultation)

Kontraindikationen:

- (Starke) Wirbelsäulenbeschwerden
- Rekonvaleszenzzeit nach einer Operation am Rücken bzw. der Bandscheibe
- Lagerungsschwindel
- Positionsunabhängige Schlafapnoe
- Alter unter 18 Jahre

Warnhinweise:

- Schnarchen kann ein Symptom für nächtliche Atemstillstände sein. Es sollte daher unbedingt vor Behandlungsbeginn die Ursache ärztlich abgeklärt werden.
- Insbesondere bei Patienten mit nächtlichen Atemaussetzern infolge obstruktiver Schlafapnoe sollte der therapeutische Effekt der Lagerungstherapie möglichst bald nach Behandlungsbeginn durch entsprechende diagnostische Maßnahmen überprüft werden.
- Bei obstruktiver Schlafapnoe, bestehenden Herzerkrankungen, erheblichem Übergewicht oder Beschwerden am Rücken sollte die Nutzung des SomnoCushion® nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen.
- SomnoCushion® darf nicht mit verletzter Haut in Berührung kommen.


Pflegehinweis: Die Stoffhülle bei 60°C in der Maschine im Schonwaschgang waschen, nicht schleudern, nur Lufttrocknen. Das Luftkissen muss vor dem Waschgang entfernt werden.

Material: Rucksackhülle 65 % Polyester und 35 % Baumwolle; Gurtbänder 100 % Baumwolle; Verstellzieher 100 % Nylon; Luftkissen 100 % PVC


LOT ~~000-1121-05~~

MD Medizinprodukt

REF Art.-Nr.: 05017343

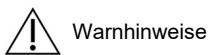

Warnhinweise

 Gebrauchsanweisung beachten

UDI (01) 4260383460235



~~(10) 000-1121-05~~

 **Hersteller:**

Tomed GmbH • Medizinische Produkte
Im Rapsfeld 57 • 50933 Köln • Deutschland
Tel.: 0221 17067206 • Fax: 0221 17067207
E-Mail: info@tomed.com • www.tomed.com

Stand: 04.11.2024
Dok.-Nr.: UI.SCS.1124.GE.01



Das Produkt entspricht allen Anforderungen der Medical Device Regulation 2017/745, die anwendbar sind.